

REFERANSER

- ↑ Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
- ↑ Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795.

MAKE SURE

GRAVIDITETSTEST

STRIMMEL - 10 stk

	REF W1-S (25 mIU/ml)
----------------------------	-----------------------------

MAKE SURE Graviditetstest Strimmel er en rask graviditetstest som du enkelt kan bruke selv. Den måler tilstedeværelsen av humant Chorion Gonadotropin (hCG), som finnes i urin veldig tidlig i graviditeten. Kun til bruk for *in vitro* selvtesting. Kun for utvortes bruk.

	REF W1-S (25 mIU/ml)
----------------------------	-----------------------------

	Beskyttes mot sollys
	Lagres mellom 4 °C og 30 °C
	Lagres tørt
	Kun til engangsbruk
	CE 0537

DISTRIBUERT AV:
Tafre AS
Grev Wedels gate 4a/6b
3111 Tønsberg, Norge
Tlf. +47 33 33 13 13
www.tafre.no

	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd No.8, Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, P. R China
	Qarad b.v.b.a. Ciplastraat 3, B-2440 Geel, Belgia

Flere spørsmål om testen?
Se www.makesure.no

Planlegger du graviditet?
Se www.jegvilhabarn.no

	TAFRE AS
	MAKE SURE

VIKTIG INFORMASJON

1

- Kun til utvortes bruk. Må ikke svelges.
- Skal kastes etter bruk. Testen kan ikke brukes mer enn en gang.
- Ikke bruk testen etter utløpsdatoen.
- Ikke bruk testen dersom folieposen er ødelagt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

	LAGRING OG STABILITET
	- Oppbevares ved 4-30 °C i forseglet foliepose frem til utløpsdatoen.
	- Oppbevares beskyttet fra direkte sollys, fuktighet og varme.
	- MÅ IKKE FRYSES.
	- Folieposen bør ikke åpnes før du er klar til å utføre testen.

	URINPRØVETAKING OG FORBEREDELSE
	

	NÅR SKAL URINPRØVEN SAMLES?
	Urinen kan samles når som helst, men den første morgen-urinen er optimal. Det er fordi urinen da er mest konsentrert og har høyest konsentrasjon av hCG.

	HVORDAN SKAL URINPRØVEN SAMLES?
	Urinprøven samles i en ren, tørr plast- eller glassbeholder.


	HVORDAN UTFØRE TESTEN?
	

	HVORDAN UTFØRE TESTEN?
	

- Testen og urinen må ha romtemperatur under testingen (15-30 °C).
- Ta ut testen fra den forseglede folieposen.
- Dypp testen ned i urinprøven slik at pilene på testen peker ned mot prøven. Ta testen ut av urinprøven etter 3 sekunder og legg den flatt på en ren, tørr, ikke-absorberende overflate (som for eksempel kanten av urinprøveglasset).

VIKTIG: Ikke dypp testen lenger ned enn til maksmerket. Ellers vil ikke testen være riktig utført.
- Et positivt svar kan sees allerede etter 1 minutt. For å bekrefte et negativt resultat må du vente i minst 3 minutter før du leser av svaret. Etter 5 minutter er det for sent å lese av resultatet.

	HVORDAN UTFØRE TESTEN?
	

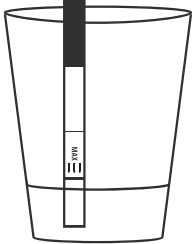

HVORDAN TOLKE RESULTATET?

1

NEGATIV (IKKE GRAVID): Bare én strek er synlig i kontrollsonen. Det er ingen strek i testsonen. Dette indikerer at ingen graviditet har blitt detektert.

	NEGATIV
	

POSITIV (GRAVID): Tydelige streker er synlige i kontroll- og testsonen. Dette indikerer at du er gravid. Intensiteten på strekene kan variere fordi ulike stadier av graviditeten har ulike konsentrasjoner av hormonet hCG.

	POSITIV
	

UGYLDIG: Ingen synlige streker, eller det er kun én strek i testsonen uten at det er en strek i kontrollsonen. Gjenta med en ny test. Dersom problemet fortsetter kan du kontakte Tafre AS eller butikken hvor du kjøpte produktene. Ha lot-nummeret til testen klart.

	UGYLDIG
	

	UGYLDIG
	

NB: Dersom fargen i testsonen er svak anbefaler vi at du tester på nytt om 48 timer.

	UGYLDIG
	

	UGYLDIG
	

	HVA GJØR DU NÅR DU VET RESULTATET?
	

	HVA GJØR DU NÅR DU VET RESULTATET?
	

	HVA GJØR DU NÅR DU VET RESULTATET?
	

- Som ved bruk av enhver hjemmetest, bør en graviditet bekreftes av en lege ved en konsultasjon.
- Hvis du har hatt et høyt inntak av væske i timene før testen utføres, eller av andre grunner har en forrynnet urin, kan konsentrasjonen av hCG være så lav at den ikke vises på testen. Hvis du likevel mistenker graviditet bør en ny urinprøve samles 48 timer senere, og testes.
- Lav konsentrasjon av hCG svært tidlig i graviditeten kan gi negativt resultat. Opplever du dette bør en ny urinprøve samles 48 timer senere, og testes.
- Forhøyet nivå av hCG kan ha enkelte andre årsaker enn graviditet. Innholdet av hCG i urin skal ikke brukes til å diagnostisere en graviditet, med mindre disse andre årsakene er utelukket.

- En normal graviditet kan ikke skilles fra en graviditet utenfor livmoren når det gjelder hCG-nivå i urin. Spontanabort kan også skape forvirring med hensyn til avlesning av testen.
- Sterilitetsbehandling basert på hCG kan gi falske positive resultater. Kontakt legen din.
- Denne testen er en kvalitativ test, og er ikke designet for å måle den kvantitative konsentrasjonen av hCG.
- Testen skal kun brukes til å undersøke urin fra mennesker.
- Uren urinprøve eller forstyrrende substanser i urin-prøven kan forårsake uriktig resultat.
- Urent testutstyr eller feil bruk av testen kan forårsake uriktig resultat.

FORVENTET RESULTAT

Negativt resultat er forventet hos friske kvinner som ikke er gravide og hos friske menn. Det er likevel viktig å vite at hCG-nivået hos damer i tidlig graviditet varierer. MAKE SURE Graviditetstest Tidlig Strimmel kan detektere graviditet så tidlig som dagen etter du forventer menstruasjon.

	FORVENTET RESULTAT
	

SENSITIVITET:
MAKE SURE Graviditetstest Strimmel gir utslag for konsentrasjoner av hCG i urin på 25 mIU/mL eller høyere.

	SENSITIVITET:
	MAKE SURE Graviditetstest Strimmel gir utslag for konsentrasjoner av hCG i urin på 25 mIU/mL eller høyere.

	SENSITIVITET:
	MAKE SURE Graviditetstest Strimmel gir utslag for konsentrasjoner av hCG i urin på 25 mIU/mL eller høyere.

	SENSITIVITET:
	MAKE SURE Graviditetstest Strimmel gir utslag for konsentrasjoner av hCG i urin på 25 mIU/mL eller høyere.

- Jeg har tatt flere tester, og det er stor forskjell på fargestyrken på kontrollstrekene i de ulike testene. Er det noe galt med testene?
 - Nei, variasjoner i styrken på kontrollstrekene er normalt og vil ikke påvirke resultatet.

- Kan jeg lese av resultatet etter at det har gått 5 minutter?
 - Nei, testresultatet må leses av før det har gått 5 minutter. En positiv test vil nok ikke endre seg på flere dager, men en negativ test kan vise et falsk positivt resultat kort tid etter testperioden på 3-5 minutter. Det beste er å kaste testen etter 5 minutter for å hindre forvirring ved avlesning.

- En rosa bakgrunnsfarge og vertikale streker dukket opp i testsonen. Er dette et problem?
 - Nei, urinprøver varierer i kjemisk sammensetning, og fuktigheten i rommet virker også inn. Slike variasjoner kan gi vertikale streker og/eller rosa bakgrunn uten at dette påvirker resultatet på noen måte. Så lenge kontrollstrekene vises etter 5 minutter virker testen normalt.

	FORVENTET RESULTAT
	

- Kan jeg lese av resultatet etter at det har gått 5 minutter?
 - Nei, testresultatet må leses av før det har gått 5 minutter. En positiv test vil nok ikke endre seg på flere dager, men en negativ test kan vise et falsk positivt resultat kort tid etter testperioden på 3-5 minutter. Det beste er å kaste testen etter 5 minutter for å hindre forvirring ved avlesning.

	FORVENTET RESULTAT
	

Negativt resultat er forventet hos friske kvinner som ikke er gravide og hos friske menn. Det er likevel viktig å vite at hCG-nivået hos damer i tidlig graviditet varierer. MAKE SURE Graviditetstest Tidlig Strimmel kan detektere graviditet så tidlig som dagen etter du forventer menstruasjon.

	FORVENTET RESULTAT
	

SENSITIVITET:
MAKE SURE Graviditetstest Strimmel gir utslag for konsentrasjoner av hCG i urin på 25 mIU/mL eller høyere.

	SENSITIVITET:
	MAKE SURE Graviditetstest Strimmel gir utslag for konsentrasjoner av hCG i urin på 25 mIU/mL eller høyere.

	SENSITIVITET:
	MAKE SURE Graviditetstest Strimmel gir utslag for konsentrasjoner av hCG i urin på 25 mIU/mL eller høyere.

Humant Chorion Gonadotropin (hCG) er et hormon som produseres av morkaken kort tid etter befruktning og skilles ut i urinen. Graviditetstesten inneholder antistoffer som spesifikt reagerer med dette hormonet. Når urin kommer i kontakt med testens absorberende del vil kapillærkrefter føre urinen oppover testmembranen. Når hCG i urinprøven kommer til testsonen vil det dannes en farget strek. Fravær av denne fargede streken indikerer et negativt resultat. Som en kontroll av prosedyren vil det komme en strek i kontrollsonen hvis testen har blitt riktig utført.

	HVORDAN VIRKER DEN?
	

	HVORDAN VIRKER DEN?
	

	HVORDAN VIRKER DEN?
	

	INNHALDET I ESKEN
	- 10 folieposer, hvor hver av dem inneholder én teststrimmel og én tørkemiddelpose. Tørkemiddelposen er kun til bruk under lagring, og skal ikke brukes i testprosedyren
	- 1 pakningsvedlegg
	HVA MER TRENGER DU?
	- En ren, tørr, plast- eller glassbeholder for å samle urinen.
	- En stoppeklokke